




Perfect surfaces

Вращающиеся шлифовальные и полировальные инструменты



EVE Ernst Vetter GmbH

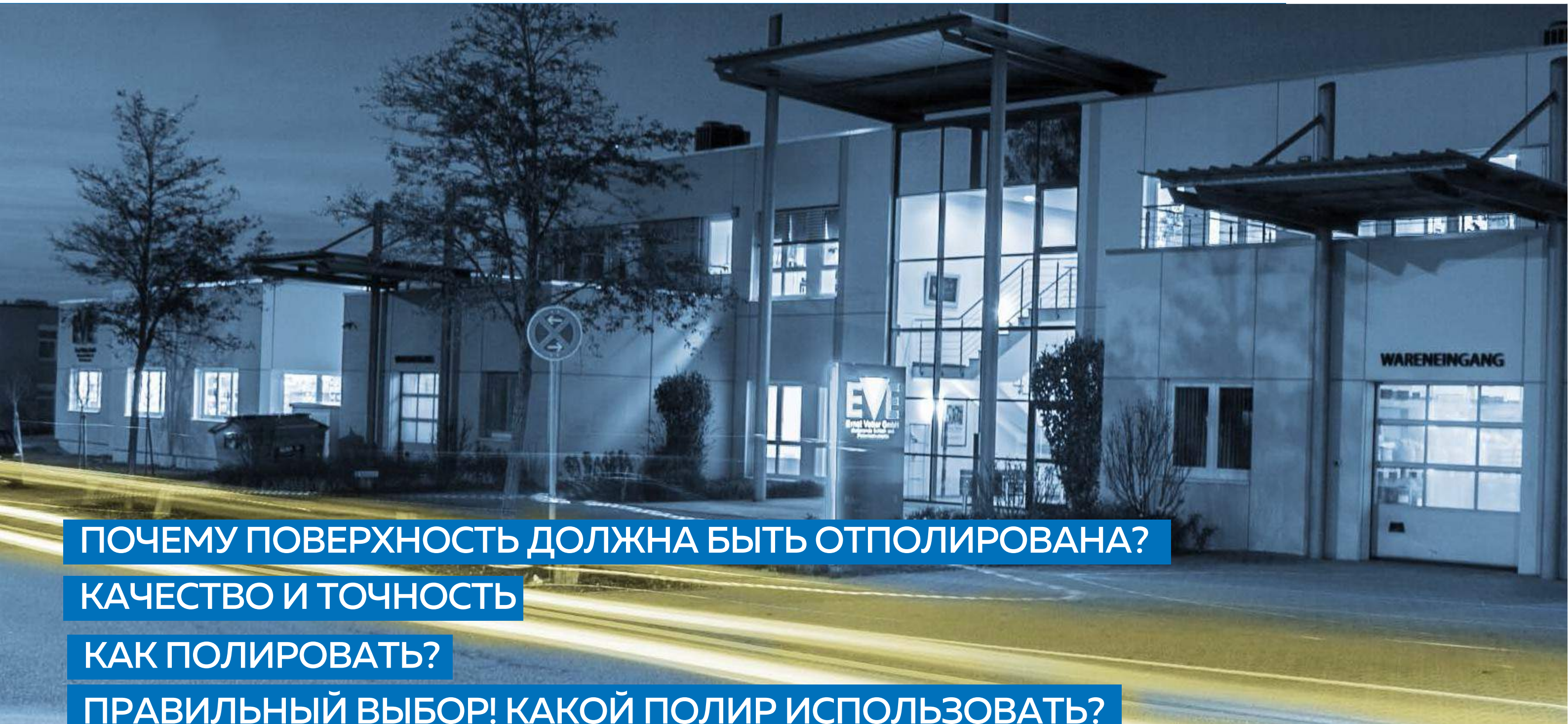

ПОЧЕМУ ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТПОЛИРОВАНА?

КАЧЕСТВО И ТОЧНОСТЬ

КАК ПОЛИРОВАТЬ?

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! КАКОЙ ПОЛИР ИСПОЛЬЗОВАТЬ?


ERNST VETTER

Качество и безопасность

Вся продукция EVE, которую поставляет МайДент24, имеет регистрационные удостоверения и декларацию соответствия.



DIN EN ISO 9001

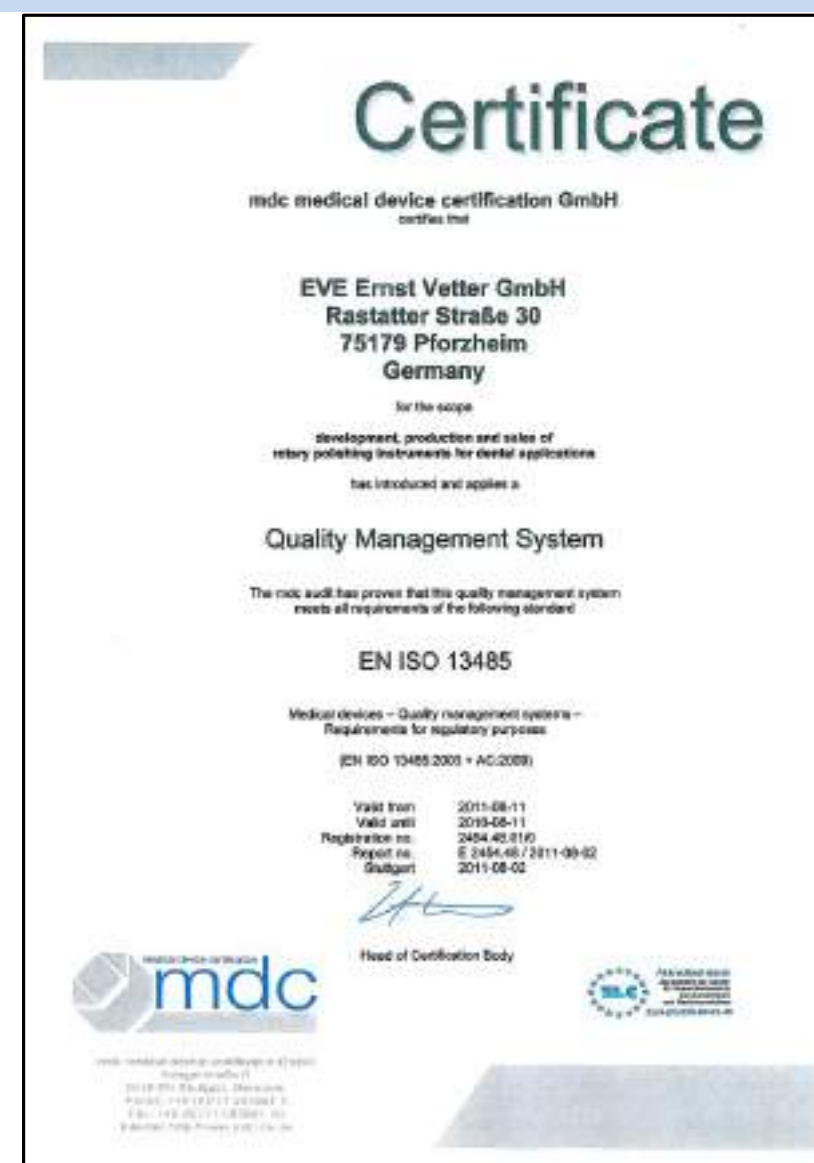


DIN EN 13485

Как полировать?

Скорость Вращения:

- Зависит от обрабатываемого материала.
- Низкая скорость, как правило, лучший выбор.
- Более высокая скорость не делает полировку эффективнее – как следствие полиры только быстрее изнашиваются.
- В каталоге EVE указаны рекомендуемые обороты для каждой линейки полиров.

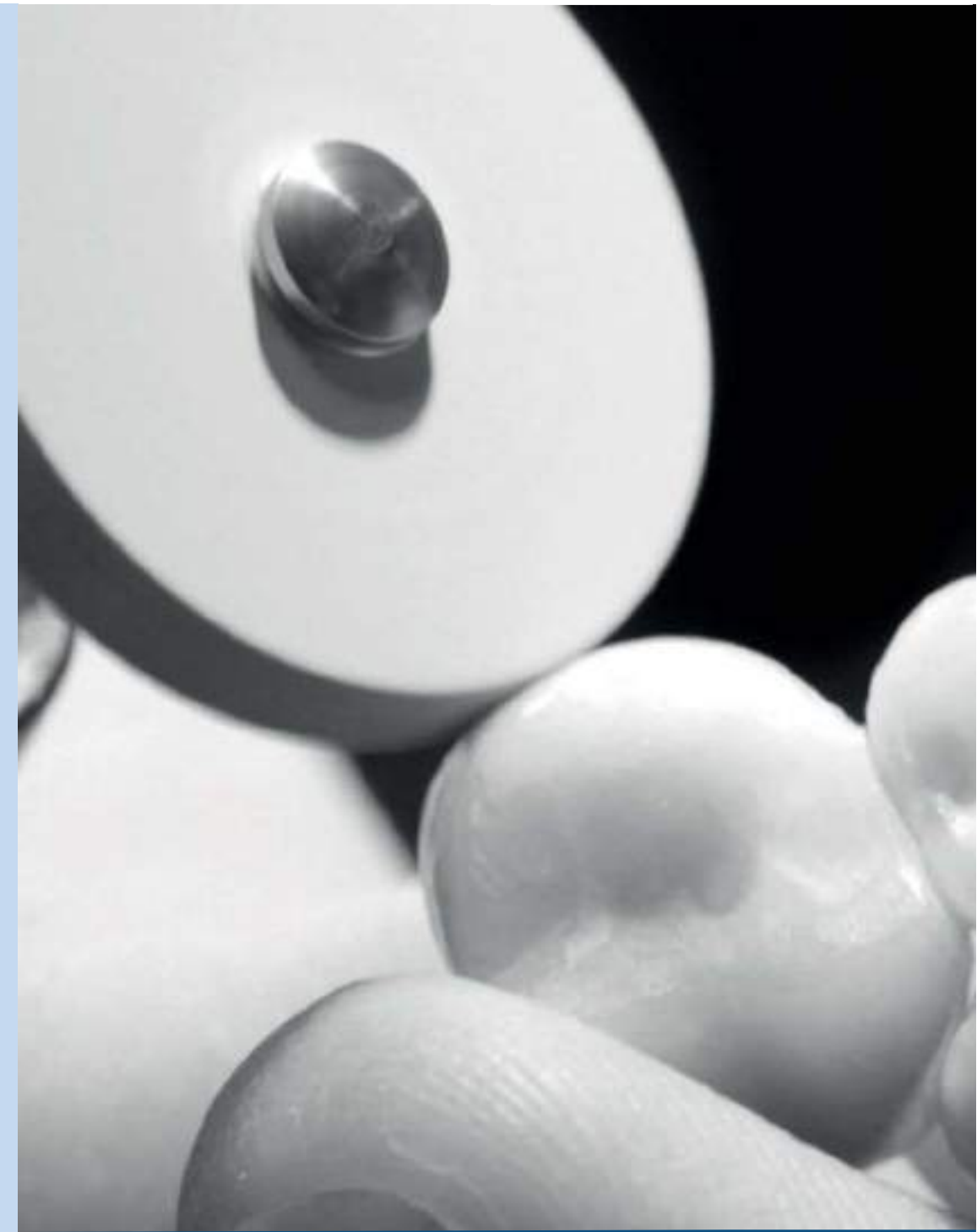


Как полировать?

Прилагаемое усилие:

- Полиры EVE работают сами и не требуют дополнительного усилия.
- Давление на полир не может быть измерено во время работы.
- Точные рекомендации носят теоретический характер и зависят от ощущения пользователя.

Основное правило: Чем меньше, тем лучше!

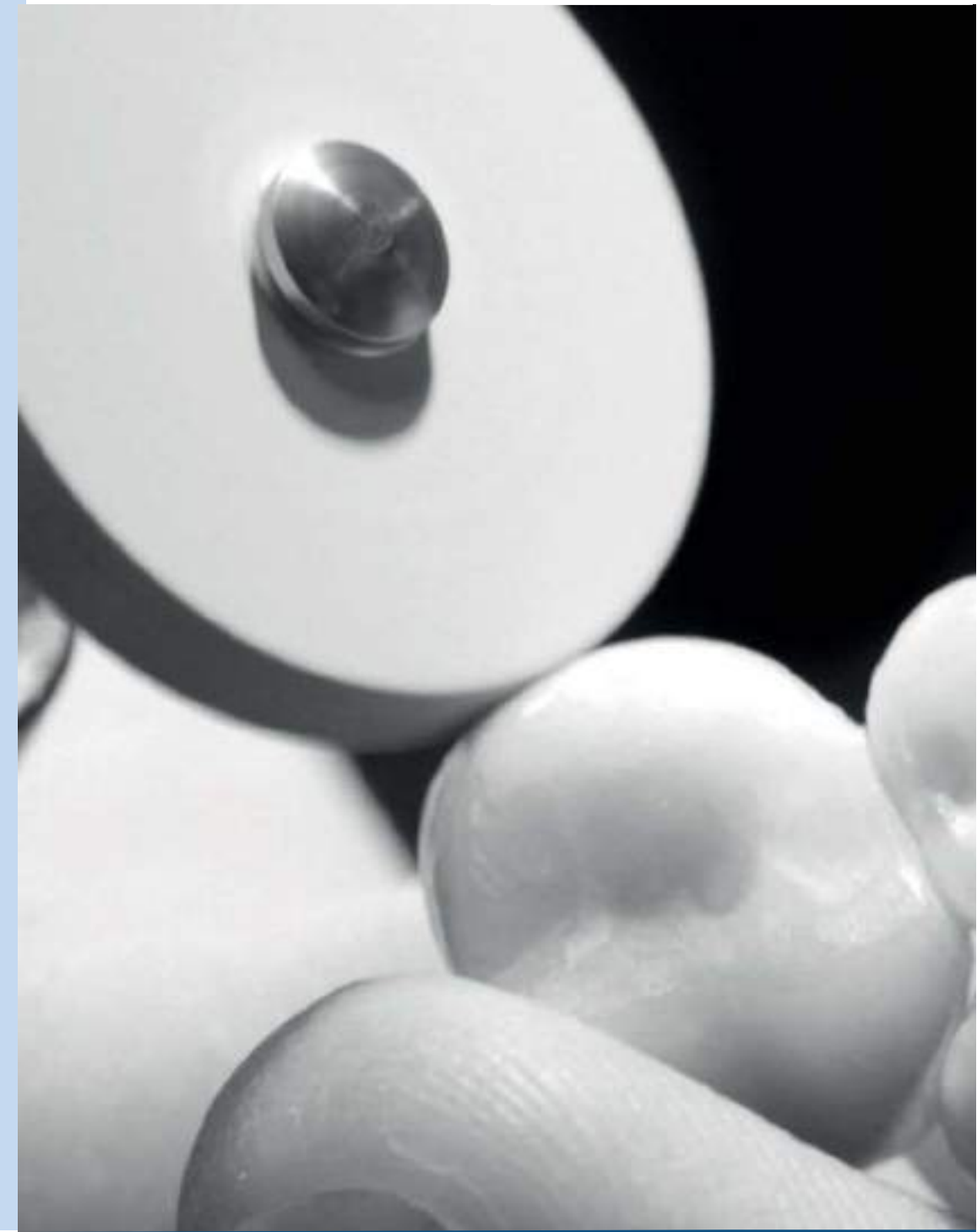


Правильный выбор! КАКОЙ ПОЛИР ИСПОЛЬЗОВАТЬ...




Алмазные полиры

- Высокий блеск поверхности.
- Короткое время работы.
- Долгий срок службы.

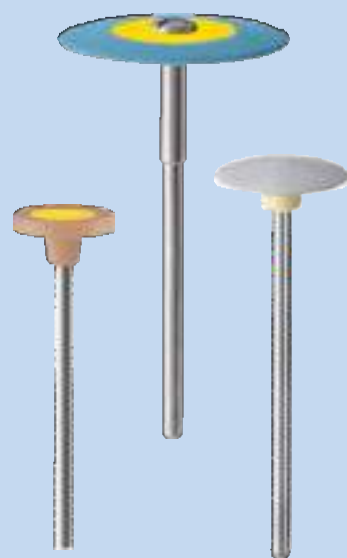

Не алмазные полиры

- Карбид кремния или оксид алюминия.
- Хорошие результаты.
- Экономическая эффективность.

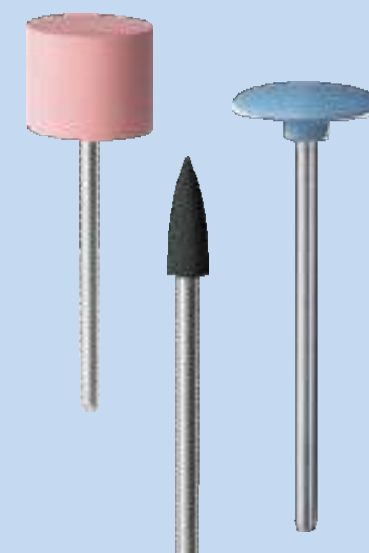

Возможность комбинирования

Предварительная полировка: не-алмазные полиры
Полировка до зеркального блеска: алмазные полиры



Стоматологам

Вращающиеся шлифовальные и
полировальные инструменты



Universal

СИЛИКОНОВЫЕ ПОЛИРЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ПРИМЕНЕНИЯ



RA101

характеристики продукта:

- Универсальное применение для всех типов материалов, включая керамику, композит и амальгаму.
- Назначение: удаление материала и сглаживание поверхности.
- Абразив: карбид кремния.
- EVE Universal с 1964 года.



Diapol

ТРЕХШАГОВАЯ СИСТЕМА АЛМАЗНОЙ ПОЛИРОВКИ ДЛЯ КЕРАМИКИ 

RA305

Характеристики продукта:

- Назначение: Сглаживание, предварительная полировка и высокий блеск.
- Абразив: алмаз.
- Для коррекции без дополнительной финишной полировки.
- Отлично подходит для пользователей CAD / CAM.



Ecoceram

НЕ-АЛМАЗНЫЕ ПОЛИРЫ ДЛЯ КЕРАМИКИ



RA160

Характеристики продукта:

- Силиконовые полиры для сглаживания и предварительной полировки керамики.
- Трехшаговая система полировки.
- Назначение: сглаживание и полировка.
- Абразив: карбид кремния.
- Главным образом, для керамических реставраций.
- Не подходит для циркония.
- Популярны только первый и второй шаг.



Diacera

ДВУХШАГОВАЯ СИСТЕМА АЛМАЗНОЙ ПОЛИРОВКИ ЦИРКОНИЯ



Характеристики продукта :

RA321

- Цель: сглаживание и полировка до высокого блеска.
- Абразив: Алмаз.
- Повышенная концентрация алмазов по сравнению с EVE Diapol.
- Отлично подходит для полных циркониевых коронок.
- Отлично подходит для пользователей CAD / CAM.
- Рекомендуется производителями: 3M, Amann Girrbach & Zirconia для материалов zirconia.



ERNST VETTER

Diapro

Двухступенчатая система полировки Силиката лития
(например, E. G. E. MAX & E. MAX PRESS BY IVOCCLAR)



RA361

Характеристики продукта :

- Цель: сглаживание и полировка до высокого блеска.
- Абразив: Алмаз.
- Отлично подходит для пользователей CAD / CAM.
- Особенно рекомендуется для материалов Ivoclar E. max.
- Сочетается с Duasynt плюс, алмазные камни для удаления материала и поверхностной обработки.



Diacomp Ultra

ОДНОШАГОВАЯ СИСТЕМА АЛМАЗНОЙ ПОЛИРОВКИ ДЛЯ ВСЕХ КОМПОЗИТОВ



Характеристики продукта :

RA350

- Назначение: сглаживание и полировка одним инструментом – без смены полира в процессе полировки.
- Контролируется путем адаптации приложенного усилия.
- Абразив: Алмаз.
- Отличные результаты на всех композитах.
- Также подходит для новых гибридных материалов, таких как 3M Ultimate или Vita Enamic.



Diacomp Plus

ДВУХШАГОВАЯ СИСТЕМА ПОЛИРОВКИ ДЛЯ КОМПОЗИТОВ



RA341

Характеристики продукта :

- Цель: Сглаживание и полировка.
- Абразив: Алмаз.
- Самые лучшие полировальные системы на стоматологическом рынке.
- Отличные результаты на всех композитах.



Есосоmр

НЕ АЛМАЗНЫЕ ПОЛИРЫ ДЛЯ КОМПОЗИТОВ



RA210

Характеристики продукта:

- Полиры из синтетического каучука для сглаживания и полировки композитов.
- Двухшаговая система полировки.
- Абразив: карбид кремния.
- Главным образом для мягких композитов.
- Не подходит для твердых композитов. В этих случаях EVE рекомендует использовать системы алмазной полировки.



Composoft

НЕ АЛМАЗНЫЕ ПОЛИРЫ ДЛЯ КОМПОЗИТОВ



Характеристики продукта:

RA128

- Силиконовые полиры для сглаживания и полировки композитов.
- Очень мягкие и гибкие полиры, которые приспособляются к обрабатываемой поверхности.
- Трехшаговая система полировки.
- Абразив: Оксид алюминия.
- Главным образом для мягкого композита.
- Не подходит для твердых композитов. В этих случаях EVE рекомендует использовать системы алмазной полировки.



Eveflex

ТРЕХШАГОВАЯ СИСТЕМА ПОЛИРОВКИ ДЛЯ ЗОЛОТА И АМАЛЬГАМЫ



RA209

Характеристики продукта:

- Назначение: Сглаживание и предварительная полировка, полировка до высокого блеска.
- Абразив: карбид кремния.



Prophyclean

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЧИСТКИ ЗУБОВ



Характеристики продукта:

- Разнообразное применение: удаление пятен, удаление зубного камня, удаление остатков бондинга после снятия брекетов.
- Абразив мягче эмали и поэтому не царапается.
- Синий: грубый для тяжелых пятен и зубного камня.
- Белый: инструмент для нормальной обработки.
- Продукт для ортодонтии.

RA209 RA410 / RA411 / RA412



Flexi-D

ГИБКИЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ КОМПОЗИТА



Характеристики продукта:

- Гибкие диски, покрытые оксидом алюминия.
- Покрыто абразивом только с одной стороны.
- Четыре разных зернистости.
- Цель: сглаживание, предварительная полировка и полировка до зеркального блеска.
- Очень гибкие и тонкие.
- Доступны размеры 10, 14 и 17mm.
- Не подходит для повторного применения.
- Сопоставимо с 3M Soflex.

Starter Kit
10, 14 and 17mm



Prophy

PROPHYLAXIS CUPS



Характеристики продукта:

- Доступен жесткий, средний, мягкий и супер-мягкий инструмент.
- Доктор сам решает, какой вариант он предпочитает. Как правило, зеленый (мягкий) и желтый (супер мягкий) наиболее популярны.
- Одноразовые – гигиенически безопасны!



Unibrush

НЕЙЛОНОВЫЕ ЩЕТОЧКИ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ОБРАБОТКИ





Характеристики продукта:

- Полировка до блеска металла, керамики и композита.
- Для полировки с полировальной пастой.

Не автоклавируются.

Можно использовать с алмазной полировальной пастой.

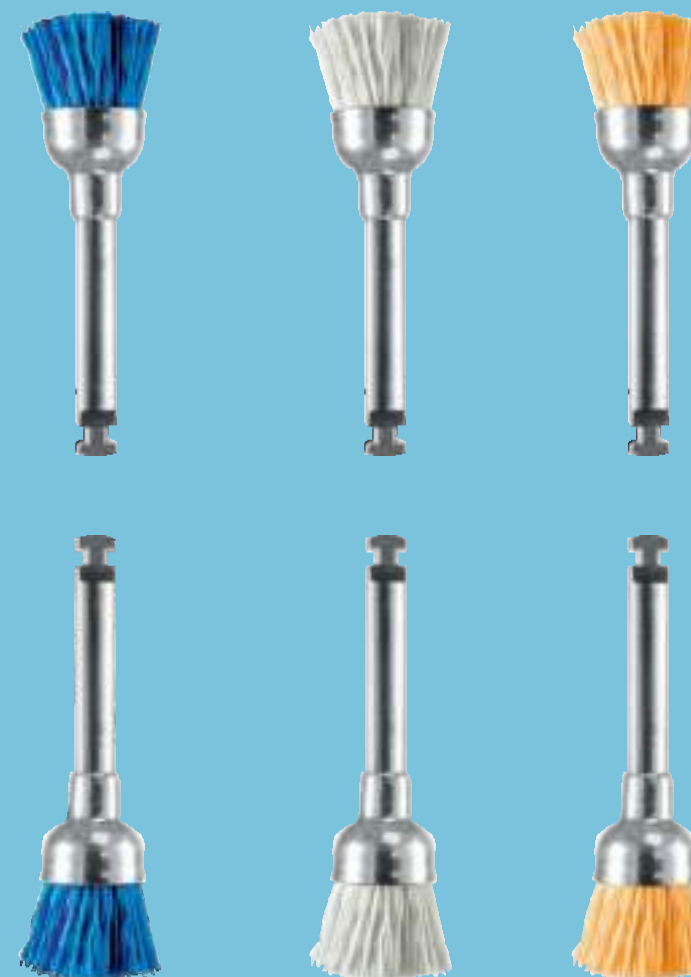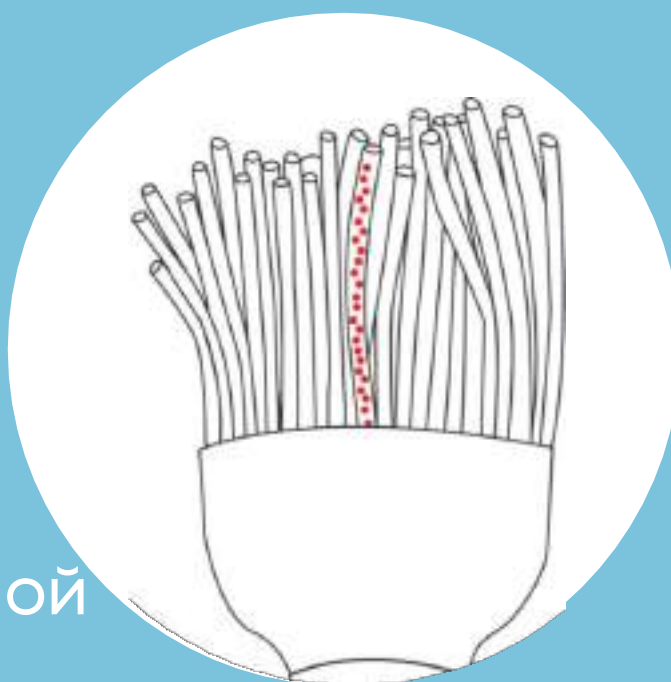

Brush & Diabrush


ПОЛИРОВКА ДО БЛЕСКА МЕТАЛЛА, КЕРАМИКИ И КОМПОЗИТОВ




Характеристики продукта:

- Полировка до блеска металла, керамики и композитов.

Возможно применение без полировальной пасты.

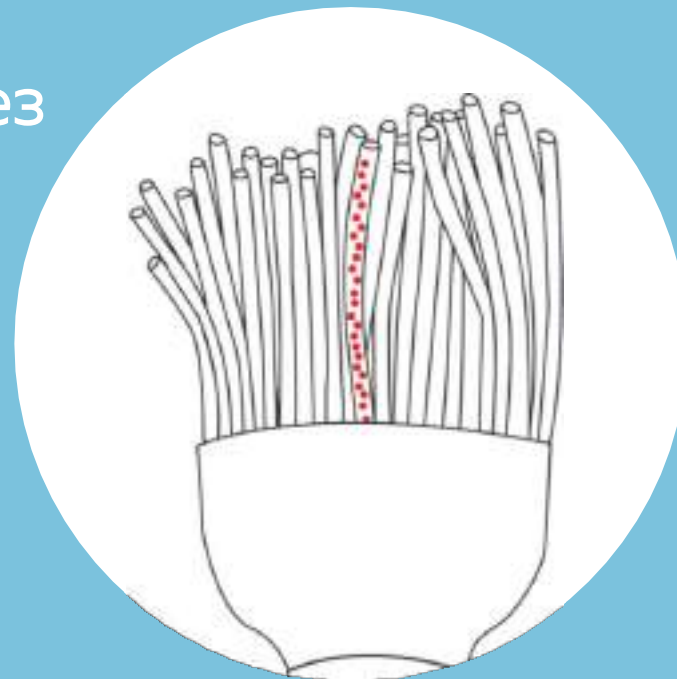

Волокна с интегрированным абразивом
(Карбид кремния или Алмаз)

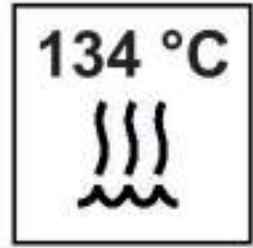

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

ОЧИСТКА / ХРАНЕНИЕ



- Перед первым использованием полировальные инструменты должны быть продезинфицированы и обработаны.
- Убедитесь, что дезинфицирующее средство подходит для полиров и что инструкции соблюдаются должным образом.
- Осторожно: полиры EVE не предназначены для стерилизации в сухожарах.
- После использования с пациентом все полировальные устройства должны быть продезинфицированы и обработаны.
- После дезинфекции тщательно промыть водой.
- Отделите держатели от полиров во время обработки и стерилизации.

Хранение

- Полиры EVE следует хранить при комнатной температуре и защищать от пыли.